

CASOS CLÍNICOS

DR. AGUSTÍN ALCÁNTARA GARCÍA

Colegiado 14/3093. Práctica privada. Córdoba.

Ponente en diversas comunicaciones científicas y cursos teóricos de endodoncia

Endodoncista
Microendodoncia



Jata Endo

Os presento 2 Casos clínicos con limas ESP Files Gold Shaper con aleación Aurea elástica

Procedimiento: El primer caso se realizaba con limas K 8-10, ESP Files Gold Shaper, aleación Aurea elástica de Jata endo.

Gutapercha termoplástica + AhPlus®

Lo habitual es usar limas de 25 mm en molares porque abarcan las longitudes medias de los conductos de estos (20-25 mm)

Pero a veces te encuentras con molares como el que os presento a continuación cuyos conductos vestibulares, con referencias vestibulares, medían 27,5 mm y el conducto palatino con referencia palatina 29 mm.

Con la dificultad añadida de la obturación de dichos conductos ya que habitualmente, las longitudes de las gutaperchas son de 28 mm.

Conclusión: Para este molar utilicé limas K manuales del 8 y 10 mm y limas ESP Files Gold Shaper - Aurea (de Jata Endo) de 31mm por su aleación muy elástica que resiste perfectamente las tensiones en conductos tan largos.

Procedimiento: En este segundo caso se realiza con limas K 15-20 y limas Esp Files Gold Shaper, aleación Aurea elástica de Jata endo.

PUI y gutapercha termoplástica + AhPlus®

Conclusión: La ventaja de las limas con aleación Aurea es que trabajan mejor en dobles curvaturas, gracias a su aleación muy elástica, y en conductos estrechos por su menor conicidad.

