

CASO CLÍNICO

DR. JAVIER TORRES POLO

Endodoncista-Implantólogo

Colegiado 3672. Director médico de ICEO. Lloret de Mar (Girona)



Jata Endo

Caso clínico con limas ESP Files Thermo flex

Paciente: Mujer de 42 años con discapacidad intelectual.

Motivo de la consulta: Remiten a nuestra clínica paciente para tratamiento en 1.4

Exploración clínica: Nos remiten a paciente de 42 años para tratar la pieza que es soporte de gancho de un esquelético. Tiene funda metal-cerámica y poste metálico en raíz palatina. Presenta calcificación en tramo final de los conductos, además de una pronunciada doble curvatura.

Diagnóstico: Tratar de salvar la pieza soporte de PPR para evitar confeccionar una nueva prótesis.

Tratamiento: Retratamiento endodóntico de 1.4

Procedimiento: Retiramos el poste metálico con ultrasonidos. Se instrumenta el tercio coronal con lima ESP Files Thermoflex 30/6% para tener buen acceso al conducto.

Se instrumenta hasta el tercio medio con ESP Files Thermoflex 25/6% y en el tercio apical, hasta longitud de trabajo, con ESP Files Thermoflex 20/6%.

Se ensancha posteriormente los dos tercios apicales con ESP Files Thermoflex 25/6% para dar uniformidad al conducto.

Se obtura con Gutapercha ESP-PP 25.06 mediante condensación vertical.

Resultado: Tras dos meses se cita a la paciente y se observa que la lesión ha curado prácticamente por completo.

Conclusión: La aleación NiTi R-fase de las limas ESP Files Thermo flex, les confiere una alta flexibilidad y resistencia además de permitir el precurvado de las mismas. Esenciales para el trabajo en conductos acodados o de doble curvatura.

