

CASO CLÍNICO

DRA. RAQUEL GALLEGO BERISA

Colegiada 50000784. Práctica privada. Zaragoza

Odontóloga general

Endodoncista



Jata Endo

Caso clínico con limas ESP Files Thermo flex

Paciente varón de 55 años

Motivo de la consulta: Acude a la clínica con flemón en cuarto cuadrante

Exploración clínica: Acude a la clínica un varón de 55 años, fumador, con flemón en cuarto cuadrante. Desgaste en todas las piezas por estrés con microfisuras en esmalte teñidas de nicotina.

Diagnóstico: En primera instancia valoramos que tenga una fisura/fractura en 46.

Tratamiento: Decidimos hacer endodoncia de la pieza informando al paciente del pronóstico dudoso.

Procedimiento: Sondaje de +10mm en zona de la furca en 46, coincidiendo con una de las líneas verticales en esmalte, así que le comentamos que posiblemente la pieza tenga una fisura/fractura. Necrosis en 46, instrumentado con ESP-files Thermo flex a 25.06. Al permeabilizar los conductos mesiales supuran, pero tras la irrigación e instrumentación de los mismos deja de supurar. Decidimos obturarlo en una sola sesión, ya q conseguimos secar los conductos sin problema y porque como ya existe vía de escape a través de la fístula, la probabilidad de inflamación es menor.

Se obtura con System B® + extruder + algodón + Cavit®. Se da cobertura antibiótica con amoxicilina 1gr 1/8h/7días.

Resultado: La semana pasada vino para hacerse endodoncia del 15 porque ha fracturado la cúspide palatina, y aprovechando la visita decidimos hacer Rx de control del 46 y va regenerando hueso, así que descartamos que fuera fisura (al menos de momento) y seguiremos controlando.

Conclusión: ESP File Thermo flex fueron las limas escogidas por su gran flexibilidad y la confianza en que no se rompen gracias a su novedosa aleación. Pero, sobre todo, por su gran poder evacuador que permite hacer una limpieza profunda del conducto en casos extremos de necrosis.

